



3M™ Ketac™ Cem Plus Resin Modified Glass Ionomer Cement

זה לא קל, זה קלי-קלות!



נוחות בשימוש. ללא פשרות

התוויות (++) מומלץ מאד / (+ מומלץ)

יתרונות:

- הקשיית קיבוע של 5 שניות להסרה יעילה ומהירה של עודפי צמנט
- עוצמת קישור גבוהה יותר בהשוואה לצמנטים מסוג גלאס יונמר קונבנציונלי
- כמעט ללא רגישות פוסט-אופרטיבית
- קל ונוח לשימוש
- שחרור פלואוריד לאורך זמן
- מתאים לשימוש ברפואת שיניים לילדים
- עמיד בפני לחות לאחר הקשיה ראשונית

Indication	Metal/ Metal Based	Glass Ceramics (including Li. Disilicate) (e.g. e.max®, VITA Mark II, IPS Empress 2)	Oxide Ceramics (e.g. Lava™ Plus, Brux Zir®, Procera®)	Resin Nano Ceramics (e.g. Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative)	Resin Composites
Inlays/ Onlays	+		+		
Crowns/ Bridges	++		+		
Endodontic Posts	++		+		
Maryland Bridges					
On Implant Abutments	++		++		


מקרה קליני: הדבקת כתר חרסינה מאוחה למתכת בשן טוחנת עליונה עם

3M™ Ketac™ Cem Plus Automix


Dr. Robert Margeas, DDS באדיבות



הדבקה זמנית של שחזור מעבר מביס-אקריל 3M™ Protemp™ 4

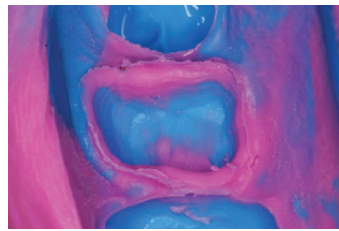

לקיחת מידה עם 3M™ Imprint™ 4 Light Body בשתי צמיגיות Heavy Body-ו

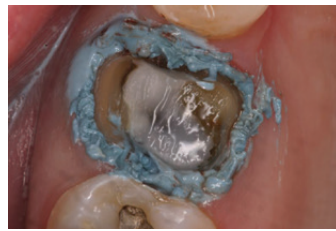

לאחר הכנת השן לכתר, בוצעה דחיקה מכנית של החניכיים ועצירת דימום ע"י חוט רטרקציה ו-3M™ Astrigent Retraction Paste



מצב התחלתי: שחזור קומפוזיט לקוי וזיהוי סדק במימד המזיו-דיסטלי בשן 26



מצב סופי: שן 26 עם כתר PFM



הסרה קלה של שאריות הצמנט בשוליים



הנחת הכתר על השן המוכנה והקשיית קיבוע באיזור שולי הכתר למשך 5 שניות



מילוי כתר PFM עם הצמנט הקבוע 3M™ Ketac™ Cem Plus Automix

מידע להזמנות

Ketac™ Cem Plus Automix



Ketac™ Cem Plus Automix Value Pack (3536)

תכולה	תיאור המוצר	מק"ט
1 Syringe 8.5g, 12 mixing tips	Ketac™ Cem Plus Automix Trial Kit	3536TK
3 Syringe 8.5g, 36 mixing tips	Ketac™ Cem Plus Automix Value Pack	3536
12 mixing tips	Ketac™ Cem Plus Automix Mix Tips Refill	3541



Ketac™ Cem Plus Clicker Refill (56930)

Ketac™ Cem Plus Clicker

תכולה	תיאור המוצר	מק"ט
1 Clicker Dispenser 11g 1 mixing pad	Ketac™ Cem Plus Clicker Trial Kit	56931
2 Clicker Dispenser 11g each 1 mixing pad	Ketac™ Cem Plus Clicker Refill	56930

3M ישראל

מדינת היהודים 91, ת.ד. 2042
א.ת. הרצליה פיתוח 4676673
טלפון: 09-615000
פקס: 09-615050
3m.oralcare.israel@gmail.com
www.3m.com/il